

Pasos para seguir durante la implantación del ESFÍNTER ZSI375PF:

1. INSERTAR SONDA FOLEY DE 16 FR.
2. DISECCIÓN
3. ABRIR LA BOLSA DEL ESFÍNTER ZSI375PF Y DEPOSITARLO EN LA SOLUCIÓN ANTIBIÓTICA
4. COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO (SUBIDA Y BAJADA DEL RESORTE)
5. DESACTIVAR EL DISPOSITIVO
6. COLOCAR EL MANGUITO
7. AJUSTAR EL MANGUITO
8. QUITAR SONDA FOLEY 16 FR.
9. ACTIVAR EL ESFÍNTER ZSI375PF
10. COMPROBAR QUE LA PRESIÓN ES CORRECTA- RESORTE EN LA LINEA MEDIA. SI ES NECESARIO: RELLENAR O QUITAR SOLUCIÓN SALINA
11. DESINFLAR EL MANGUITO Y DESACTIVAR EL ESFÍNTER
12. INSERTAR LA BOMBA
13. COLOCAR UNA SONDA FOLEY DE 12 FR. DURANTE 24 H
14. SUTURAR
15. COLOCAR ETIQUETAS Y DARLE AL PACIENTE LA CORRESPONDIENTE PARA QUE SEPA QUE DISPOSITIVO LLEVA

PREPARACIÓN DEL PACIENTE:

- BETADINE O SIMILAR: LAVADO DEL PACIENTE CON CHAMPÚ ANTIBACTERIANO (BETADINE) LA NOCHE ANTES DE LA INTERVENCIÓN Y JUSTO ANTES DE LA INTERVENCIÓN 5 MIN DE LAVADO

PREPARACIÓN DE LA MESA DE QUIRÓFANO:

- SONDA DE 16 FR. CH FOLEY
- SONDA DE 12 FR. CH FOLEY
- BATEA CON ANTIBIÓTICOS: 600 MG RIFAMPINA + 640 MG DE GENTAMICINA EN 500 ML DE SOLUCIÓN SALINA
- BATEA CON SOLUCIÓN SALINA
- BISTURÍ ELÉCTRICO
- SET TIJERAS METZEMBAUM
- PROTECTORES DE MOSQUITOS
- RETRACTOR
- SUTURAS NO REABSORBIBLES 4/0 (SUTURAR EL DISPOSITIVO PARA QUE NO SE MUEVA)
- SUTURAS REABSORBIBLES 3/0 PARA SUTURAR TEJIDO INTERNO
- IMPORTANTE CAMBIO DE GUANTES ANTES DE TOCAR EL DISPOSITIVO